

Dezinfekce na nástroje/přístroje – Oxibat

Oxibat - je vhodný pro dezinfekci a čištění lékařských nástrojů, termolabilních pomůcek včetně flexibilních endoskopů pro studenou sterilizaci.

Vlastnosti: Oxibat jsou granule dobře rozpustné ve vodě. Při rozpouštění aktivních látek ve vodě se vytváří kyselina peroctová, která dále uvolňuje kyslík. Oxibat dobře odstraňuje biologické znečištění, je lehce biologicky odbouratelný, se širokým spektrem účinku a nízkým alergenním potenciálem.

Charakteristika koncentráту: jemné granule - rovnoměrně rozprostřené zelené, světle modré a bílé částice (barva použitého TEAD), pH (1% roztoku) 10.0 - 11.0 (20°C)

Složení:

účinné látky: 1500 ppm kyselina peroctová v 1-% roztoku Oxibat granule, vytvořena z peroxouhličitanu sodného a TAED

pomocné látky: Kationtové detergenty, inhibitory koroze, chelatační činidlo, regulátor pH

Mikrobiologická účinnost: bakteriocidní, fungicidní, mykobakteriocidní, tuberkulocidní, sporicidní, virucidní A, B, C, M, T, V

Spektrum účinku / expozice:

Mikroorganismus	Koncentrace	Test	Expozice
Bakteriocidní (<i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i>)	1%	EN 13727	30 min
	2%		10 mn
Fungicidní (<i>C.albicans</i> , <i>A.niger</i>)	1%	EN 13624	30 min
	2%		10 min
Mykobakteriocidní (tuberkulocidní) (<i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i>)	2%	EN 14348	10 min
Sporicidní (<i>Bacillus subtilis</i>)	2%	EN 14347	10 min
Virucidní	Obalené viry HIV/HBV/HCV		5 min
	Adeno, polio	1%	30 min
		2%	10 min

Návod k použití: granule ředíme podle návodu, 15 – 20 min se granule ve vodě rozpouštějí. Roztok před vložením nástrojů a pomůcek řádně promícháme. Pomůcky musí být zcela ponořené, a pokud je to možné, v rozloženém stavu. Roztok je stabilní 24 hod.

účinek	koncentrace	pracovní roztok	způsob	Expozice
bakteriocidní vč.MRSA	1%	10 g / 1 l vody	ponořit a po ukončení dezinfekce opláchnout pitnou vodou	30 min
	2%	20 g / 1 l vody		10 min
fungicidní	1%	10 g / 1 l vody		30 min
	2%	20 g / 1 l vody		10 min
virucidní	1%	10 g / 1 l vody		30 min
	2%	20 g / 1 l vody		10 min
Mykobakteriocidní	2%	20 g / 1 l vody		10 min
Sporicidní studená sterilizace	2%	20 g / 1 l vody		120 min

Kompaktibilita: nerez, nekovové materiály, PVC, polypropylen, polythylene, silikony



Kat. číslo	Popis produktu	Množství	Cena bez DPH
1325100110	Dezinfekční prostředek Oxibat: nástroje/přístroje, granulát	1kg	573,-
1325100111	Dezinfekční prostředek Oxibat: nástroje/přístroje, granulát	3kg	1.558,-